

69 – INSTRUÇÃO DE COLETA - EXAME MICROBIOLÓGICO DE LEITE – revisão 00

Para uma correta interpretação do resultado é importante o completo preenchimento deste formulário.

INSTRUÇÕES PARA COLETA DA AMOSTRA

A amostra de leite deve ser coletada diretamente no recipiente esterilizado fornecido pelo laboratório seguindo-se a seqüência abaixo:

- 1) Lavar o úbere da vaca com água e sabão
- 2) O coletador deve também lavar suas mãos com água e sabão
- 3) Abrir o frasco fornecido pelo laboratório sem tocá-lo no seu interior. Coloque a tampa com a parte interna virada para cima sobre uma superfície limpa. Não toque na parte interna da tampa nem deixe-a exposta a poeira ou outros tipos de sujeira.
- 4) Por ordenha manual, coletar o leite diretamente no frasco
- 5) Fechar bem o frasco verificando se não há vazamento
- 6) Levar ao laboratório no menor espaço de tempo possível.

DATA DA COLETA:

PROPRIETÁRIO

Nome da pessoa física ou empresa:

IDENTIFICAÇÃO DO ANIMAL

Nome, número ou código:

LOCAL DA COLETA (endereço, bairro, distrito):

.....

RESPONSÁVEL PELA COLETA

Nome: RG:.....

Fone para contato:

O ANIMAL FOI OU ESTÁ SENDO TRATADO COM ANTIBIÓTICOS?

Em caso afirmativo, relacione os antibióticos usados:

.....

Para uso do laboratório Nº da FA

Assinatura do responsável pelas informações

Nome:

Cargo: